

# Lampa bactericida UVC, putere 15W, pentru sterilizare, fixare perete sau pe suport portabil

## Manual de instructiuni

Lampa UVC cu montare pe perete este recomandată pentru incinte și spații mici (microbiologie, măsuțe instrumentar, hotel, spitale, clinici etc) cu o suprafața de sterilizare de până la 15mp.

- Prevăzută cu 1 tub generator de radiație UV-C (lungime de undă 253,7nm);
- Durata de viață a tuburilor UV până la reducerea radiației UV cu 15%: minim 8000 ore;
- Tip montare: prindere pe perete; prindere support portabil;
- Alimentare: 220V / 50Hz, cablu de alimentare cu intrerupator on/off;
- Termen de garanție 12 luni.

TIMPUL DE STERILIZARE: pozitionati lampa in centrul camerei si urmati instructiunile: Suprafata Timp sterilizare

- 0-15 mp 15 min
- 15-20 mp 30 min
- 20-40 mp 60 min
- 40 – 60 mp 90 min
- 60-90 mp 120 min

### APLICATII:

• Dezinfectia aerului și suprafețelor din încăperi cu încărcătura microbiană mare prin intermediul radiației UV (spitale, laboratoare de analize medicale, laboratoare de microbiologie, săli de operație, cabinete medicale individuale CMI, cabinete stomatologice, săli așteptare, producția de medicamente, produse naturiste etc).

MICROORGANISME DISTRUSE: bacterii, viruși, spori de mușegai, drojdii, alge, protozoare etc.

### MOD DE INSTALARE:

1. Îndepărtați corpul protector și tubul bactericid.
2. Conectați cablurile electrice la blocul terminal pentru conexiuni.
3. În interiorul cutiei veți găsi șuruburile corespunzătoare cu ajutorul cărora se realizează fixarea acestuia pe perete.
4. După montare puteți porni tensiunea de alimentare a instalației electrice.

### ATENȚIE!!!

1. Înainte de a porni lampa asigurați-vă că în camera respectivă nu au rămas persoane, animale sau plante.
2. Lumina ultravioletă reflectată dintr-o oglindă de exemplu poate fi la fel de daunătoare pentru piele și ochi.
3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat, la îndemana copiilor sau a persoanelor lipsite de discernământ (cel mai bine închideți cu cheia camera în care acesta funcționează).
4. Lumina ultravioletă UV-C directă este daunătoare pentru piele și mai ales pentru ochi, poate provoca arsuri grave.
5. Nu vă dezinfectați mainile cu această lampă, folosiți lumina ultravioletă UV-C doar pentru dezinfectia obiectelor. Pentru maini folosiți săpunul sau alte produse recomandate.
6. Nu priviți direct la lampa în timpul utilizării.

7. Lucruri precum tablouri, panze, fotografii si in general obiecte care pot fi deteriorate de lumina soarelui, nu sunt, de asemenea, recomandate sa fie expuse la lumina directa a lampii UV-C.

8. Opriti lampa atunci cand doriti sa o curatati.

9. Daca temperatura camerei este mai mica de 20 grade Celsius sau mai mare de 40 grade Celsius, timpul de sterilizare trebuie extins.

10. Dupa ce s-a incheiat ciclul de sterilizarea al incaperii nu intrati imediat, incinta trebuie aerisita minim 15-30 minute.

11. Nu lasati copiii in preajma dispozitivului.

Acest simbol indica faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separate și să nu fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței în compoziția lor a unor substanțe periculoase. Pentru informații suplimentare privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale și central de colectare autorizate în acest sens.